


# RHINIX™

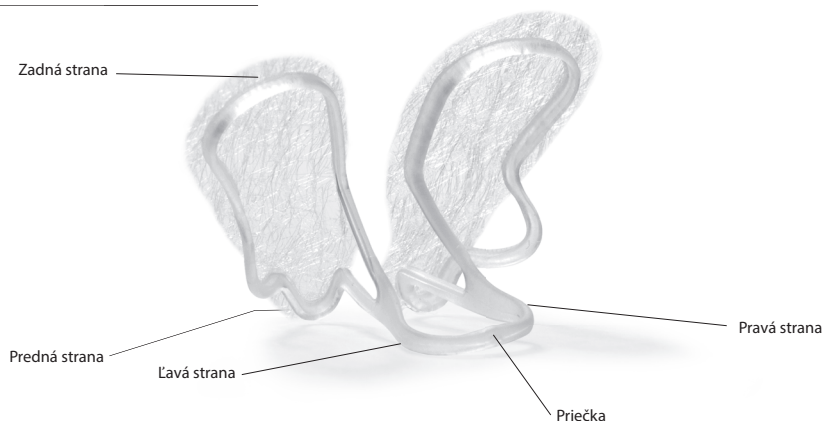


## Zamýšľané použitie

RHINIX™ **nosový filter**, je určený pre pacientov od 6 rokov, umožňuje voľné dýchanie nosom a slúži na prevenciu alebo zmiernenie sezónnej alergickej nádchy (senná nádcha) a sezónnych alebo celoročných alergií na iné vzdušné alergény s podobnou veľkosťou ako sú peľové alergény z trávy.

RHINIX™ nosové filtre sú dostupné **bez lekárskeho predpisu**.

## Návod na použitie

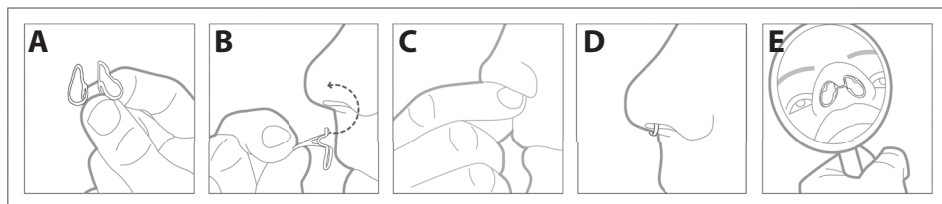

**Odporúčanie:** RHINIX™ nosový filter bude najúčinnnejší, ak ho začnete používať ešte pred objavením sa príznakov. Ak ho začnete používať až po začatí príznakov, účinok môže byť oneskorený.

1. Pred vložením si vyfúkajte nos a uistite sa, že je suchý.
2. Vložte filter podľa návodu:
  - Hrot filtra musí smerovať dopredu (viď obrázky A a B).
  - Používajte zrkadlo, kým si na vkladanie nezvyknete.
  - Použite zrkadlo na kontrolu, či je pomôcka správne umiestnená (viď obrázky D a E)
  - Výšku filtra je možné upraviť pomocou priečky (crossbar).
  - Pri správnom vložení sa môžete dotknúť okraja nosnej dierky bez nepríjemného pocitu (viď obrázok C).
  - Na vloženie pomôcky môžete spočiatku potrebovať obe ruky, kým si osvojíte správnu techniku.

Filter je možné počas 24 hodín **vybrať a znova použiť** (napr. ak si potrebujete vyfúkať nos alebo sa chcete najesť bez vloženia nosového filtra, jednoducho ho vyberte a po jedle znova vložte). Pri nosení filtra **nemusíte dýchať výlučne nosom** – dýčajte prirodzene podľa potreby.

**Odstránenie filtra:** Vyberte filter potiahnutím priečky smerom von (opačne ako pri vkladaní – viď obrázok B).

# RHINIX™

## Výber veľkosti

Max. 13 mm **SMALL (S)**

13 - 16 mm **MEDIUM (M)**

Min. 16 mm **LARGE (L)**



*\*Ilustračný obrázok nezodpovedajúci skutočnému rozmeru nosovej dierky.*

Použite veľkostnú tabuľku na výber správneho filtra.

Použite vyššie uvedenú veľkostnú tabuľku na výber správnej veľkosti filtra. Ak je nosový filter príliš veľký, môže byť nepohodlný – v takom prípade odporúčame vyskúšať menšiu veľkosť. Pre optimálny účinok použite správnu veľkosť.

Nosový filter nemusí úplne tesniť pri okrajoch nosa, aby bol účinný. Filter sa postupne prispôbi tvaru vašej nosovej dutiny, takže ho budete cítiť čoraz menej.

## Upozornenia

- Určené len na jednorazové použitie.
- Nosový filter je potrebné vymeniť aspoň raz denne, aj keď ho počas 24 hodín môžete vybrať a znova vložiť.
- Nepoužívajte pri poranenej, spálenej alebo podráždenej koži.
- Nevhodné pre deti mladšie ako 6 rokov.
- Nepoužívajte počas spánku.
- Pri fyzickej námahe môžete cítiť sťažené dýchanie nosom – ak je to nepríjemné, filter odstráňte.
- Ak máte pocit, že sa nosový filter upchal alebo pociťujete sťažené dýchanie, filter vyberte a vložte nový.

### Nežiaduce účinky:

- Reakcia v mieste aplikácie alebo precitlivosť na nosové filtre RHINIX™, napríklad podráždenie pokožky.
- Pri výskyte vyrážky alebo podráždenia pokožky prerušte používanie.
- Ak filter prichádza do kontaktu so sliznicou, prerušte používanie, skúste menšiu veľkosť alebo upravte polohu filtra.

### Skladovanie:

- Nevystavujte extrémnym teplotám (>60 °C).
- Neskladujte na priamom slnku.
- Uchovávajte v pôvodnom obale až do použitia.
- Skontrolujte filter pred použitím – musí byť neporušený, s membránou pripevnenou k rámu.

**Výrobca:** Rhinix ApS, Rymarksvej 5, DK 8240 Risskov.  
info@rhinix.com, [www.rhinix.com](http://www.rhinix.com)

**Distribútor:** 1forU s. r. o., Ludrová 158, 034 71 Ludrová, Slovakia.  
+421 903 833 966, [www.rhinix.sk](http://www.rhinix.sk)

MD



M6

REF



2502\_SK\_var1